

CDV +CPV Antígeno Combo Prueba Rápida de Casete (Secreciones+Heces/Vómito)

Ficha Técnica

REF VIDP-525 Español

USO PREVISTO

CDV+CPV Antígeno Combo Prueba Rápida de Casete (Secreciones+Heces/ Vómito) es una prueba inmunocromatográfica de flujo lateral para la detección cualitativa de Virus de Distemper Canino (CDV Ag) en secreciones nasales/oculares de perros y parvovirus canino (CPV Ag) en las heces o vómito de perro.

PRINCIPIO

CDV+CPV Antígeno Combo Prueba Rápida de Casete es una prueba inmunocromatográfica de flujo lateral para la detección cualitativa de antígenos de Virus de Distemper Canino (CDV) y parvovirus canino (CPV). El casete de prueba tiene dos ventanas de prueba. Cada ventana de prueba tiene la región T (prueba) y la región C (control). Durante la prueba, la muestra se aplica en los pozos de muestra en el casete. Si están presentes los antígenos de CDV o CPV, en la muestra, aparecerá una línea de color en la región de la línea de prueba que indica un resultado positivo. Si la muestra no contiene antígenos de CDV o CPV, no aparecerá una línea de color en la región de la línea de prueba que indica un resultado negativo. Para servir como un control de procedimiento, siempre aparecerá una línea de color en la región de línea de control que indica que se ha añadido un volumen adecuado de muestra y se ha producido la absorción de membranas.

ALMACENAMIENTO Y ESTABILIDAD

Almacene en su envase a temperatura ambiente o refrigerado (2-30°C). La prueba es estable hasta la fecha de caducidad localizada en la bolsa sellada. La prueba debe permanecer en la bolsa sellada hasta su uso. **NO CONGELAR**. No utilice después de la fecha de caducidad.

PRECAUCIONES

- No utilice después de la fecha de caducidad.
- Maneje todas las muestras como si contuvieran agentes infecciosos. Observe las precauciones establecidas contra los peligros microbiológicos durante las pruebas y siga los procedimientos estándar para la eliminación adecuada de las muestras.
- Use guantes desechables y protección para los ojos cuando se están probando muestras.
- La humedad y la temperatura pueden afectar negativamente a los resultados.

- No abra la bolsa de la prueba hasta que esté listo para iniciar la prueba.
- No reutilice el kit de prueba.
- No mezcle componentes de diferentes lotes y diferentes productos.

MATERIALES

Materiales Contenidos

- Casets de prueba
- Goteros
- Tubos plásticos con búfer
- Hisopos
- Ficha Técnica

Materiales Necesarios Pero No Contenidos


- Temporizador

INSTRUCCIONES DE USO

Permita que el casete de prueba, la muestra, el búfer y/o los controles se equilibren a temperatura ambiente (15-30°C) antes de la prueba.

- Saque el casete de prueba de la bolsa de aluminio y utilícelo lo más pronto posible. Se obtendrán los resultados mejores si la prueba se realiza dentro de una hora.
- Colección de muestra:
 - Para heces/vómito:

Recogja las heces o vómito de perro con el hisopo del ano de perro o del suelo. La cantidad de heces en hisopo es como siguiente:

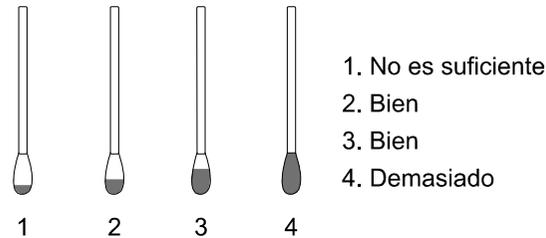

Inserte el hisopo húmedo en el tubo de búfer proporcionado con el kit. Mézclelo y agítelo para asegurar una extracción suficiente de la muestra.



b. Para secreciones:

Recoja las secreciones oculares y nasales de perro con otro hisopo proporcionado. Haga que el hisopo se moje suficientemente.

Nota: Recoja la secreción ocular de los párpados superior e inferior, por favor evite las secreciones en la esquina del ojo. Inserte el hisopo húmedo en el mismo tubo plástico con búfer. Agítelo para asegurar una buena extracción de la muestra.

- Coloque el casete de prueba en una superficie limpia y nivelada. Sostenga el gotero verticalmente y **transfiera 3-4 gotas de muestra extraída** (aproximadamente 120-160 µL) al pozo de muestra (S) del casete de prueba, luego inicie el temporizador. Vea la ilustración siguiente.

- Lea el resultado en **5-10 minutos**. No interprete los resultados después de 15 minutos.

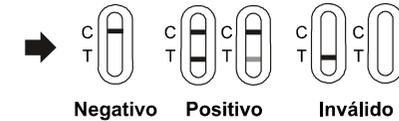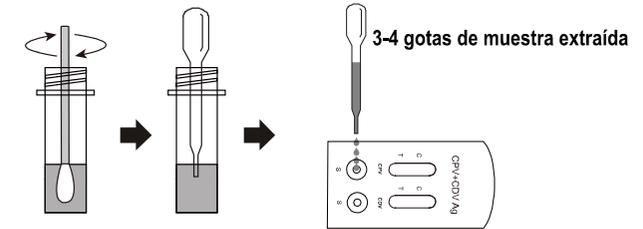

INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS

Positivo: La presencia de la línea C y la línea T, no importa la línea T es clara o vaga.

Negativo: Sólo aparece la línea C clara.

Inválido: No hay línea de color aparece en la zona C, no importa si aparece la línea T.

LIMITACIÓN

CDV+CPV Antígeno Combo Prueba Rápida de Casete solo para el diagnóstico canino in vitro. Todos los resultados deben considerarse con otra información clínica disponible del veterinario. Para confirmar los resultados, se recomiendan métodos de confirmación como PCR

Índice de símbolos

	Consulte las instrucciones de uso		Tests por kit		No reutilizar
	Solo para diagnóstico in vitro		Fecha de caducidad		# de Catálogo
	Almacenar entre 2-30 °C		Número de lote		
	No utilizar si el paquete está dañado		Fabricante		